

Fiala Gel

Holoil®

Dispositivo medico classe IIb
Solo per uso cutaneo

Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

Modalità di applicazione

FIALA GEL 5ml

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® e massaggiare fino a completo assorbimento; coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante per proteggere la lesione. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento. In caso di micosi e onicomicosi si consiglia di continuare l'applicazione di Holoil® per 15 giorni dopo la completa rigenerazione.

Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tessutale è minore di 30 mmHg di O₂.

Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tessutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.

Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente (20°/ 25°C).
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI

INCI formulazione gel Fiala 5ml 

Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

Rev. 13 di Maggio 2019

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

 LOT	NUMERO DI LOTTO	 REF	CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE	 DOPO L'USO NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUO' ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 QUANTITA' STIMATA	 FABBRICANTE	 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI		

COD.INT. ISTHOL5G



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente