

## Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tissutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tissutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

## Tipologia dell'operatore

**Per lesioni semplici:** seguire le indicazioni riportate nel presente foglietto illustrativo.

**Per lesioni complesse (che richiedono supervisione medica):** il dispositivo può essere usato sia in strutture sanitarie sia a domicilio sotto controllo medico, a cura del personale sanitario o anche da parte di familiari o addetti all'assistenza, adeguatamente addestrati all'uso del prodotto.

## Modalità di applicazione

*TUBO GEL 30ml*

**Trattamento di lesioni semplici:** *herpes labialis, acne infetta, eczemi, orticaria, micosi, escoriazioni, pruriti intimi, emorroidi, fistole, ragadi, occhio di pernice, onicomicosi, tiloma, verruche, unghie incarnite, piede d'atleta, ustioni, ferite traumatiche.*

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® e massaggiare fino a completo assorbimento. Coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante o con garza sterile in TNT, in modo che fattori esterni non diano luogo ad infezioni. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento. In caso di micosi e onicomicosi: applicare Holoil® per almeno 15 giorni dopo la completa rigenerazione.

*GEL SPRAY 100ml - GARZE medicate monouso 10 pz. (imbustate singolarmente) 10cm x 10cm*

**Trattamento di lesioni complesse:** *ferite traumatiche e post-chirurgiche, ustioni, ulcere, ulcere da pressione, radiodermiti, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, gestione dei trapianti cutanei.*

**ATTENZIONE: le lesioni complesse richiedono sempre la supervisione di un medico o di personale medico autorizzato. Per maggiori informazioni sull'uso di Holoil® in questi casi consultare il sito [www.holoil.it](http://www.holoil.it)**

**IMPORTANTE: le garze medicate devono essere cambiate ad ogni medicazione.**

## Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tissutale è minore di 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

## Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tissutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

[www.rimos.com](http://www.rimos.com) - [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com)

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente

## Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente (20°/ 25°C).
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Dopo l'uso, smaltire secondo le regole le garze Holoil® ed i contenitori.
- Non utilizzare la stessa garza Holoil® su altri pazienti.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI

## INCI formulazione gel SPRAY



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Phenoxyethanol; Carbomer; Triethanolamine; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

## INCI formulazione gel Tubo 30 ml



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

## INCI formulazione gel GARZE MEDICATE



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Triethanolamine; Carbomer; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Ethylhexylglycerin; Aroma.

Rev. 13 di Maggio 2019

**La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.**

 LOT NUMERO DI LOTTO	 REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE	 DOPO L'USO NON DISPNDERE NELL'AMBIENTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUO' ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 QUANTITÀ STIMATA	 FABBRICANTE	 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD.INT. ISTHOLG



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

[www.rimos.com](http://www.rimos.com) - [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com)

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente