

Olio Spray

Holoil®

Dispositivo medico classe IIb
Solo per uso cutaneo

Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

Tipologia dell'operatore

Per lesioni semplici: seguire le indicazioni riportate nel presente foglietto illustrativo.

Per lesioni complesse (che richiedono supervisione medica): il dispositivo può essere usato sia in strutture sanitarie sia a domicilio sotto controllo medico, a cura del personale sanitario o anche da parte di familiari o addetti all'assistenza, adeguatamente addestrati all'uso del prodotto.

Modalità di applicazione

OLIO SPRAY 30ml

Trattamento di lesioni semplici: *escoriazioni, geloni, ustioni, ferite traumatiche.*

Pulire la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® anche più volte al giorno i primi 2-3 gg, esercitando un leggero massaggio se necessario. Successivamente, diminuire le applicazioni giornaliere o applicare a giorni alterni, fino al totale risanamento della lesione. Il prodotto può essere erogato su garze TNT sterili da applicare direttamente sull'area lesionata. Per mantenere in loco le garze, si possono applicare altre garze TNT bloccate con cerotto traspirante, per poi fissare l'insieme con benda elastica coesiva crespata o con benda a rete elastica.

Importante: le garze imbevute di Holoil® Olio Spray devono essere cambiate ad ogni medicazione; se necessario prima di applicare le nuove garze, lavare la lesione con soluzione fisiologica.

Trattamento di lesioni complesse: *ferite traumatiche e post-chirurgiche, ustioni, ulcere, ulcere da pressione (prevenzione), radiodermiti, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, gestione dei trapianti cutanei.*

ATTENZIONE: le lesioni complesse richiedono sempre la supervisione di un medico o di personale medico autorizzato. Per maggiori informazioni sull'uso di Holoil® in questi casi consultare il sito www.holoil.it

Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tessutale è minore di 30 mmHg di O₂.

Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tessutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente

Olio Spray

Holoil®

Dispositivo medico classe IIb
Solo per uso cutaneo

Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare di utilizzare disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Sotto ai 17°C la formulazione oleosa tende a solidificare. Per garantire un corretto funzionamento dello spray si consiglia di conservare il prodotto a temperature comprese tra 20°C e 35°C.
- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C.
- Non vaporizzare su una fiamma o un corpo incandescente.
- Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione.
- Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora non sono state mai rilevate.
- In caso di ipersensibilità individuale e/o allergica ai componenti interrompere l'applicazione.
- Non riutilizzare le garze impregnate dopo l'uso. Smaltire le garze impregnate e i contenitori dopo l'uso secondo le regole.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- La formulazione oleosa deve essere agitata bene prima dell'uso.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

NON CONTIENE PARABENI

INCI formulazione OLIO SPRAY 30ml














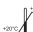

Ingredienti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Butane; Isobutane; Propane.

Rev. 14 di Aprile 2022

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

 CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE E DA FONTI DI CALORE	 CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO	 CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +20°C E +35°C	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE
 LOT NUMERO DI LOTTO	 REF CODICE PRODOTTO	 QUANTITÀ STIMATA	 FABBRICANTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 DOPO L'USO NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
			 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD.INT. ISTHOLSP



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente