



RI.MOS.  
Medical Products

RI.MOS. s.r.l Via Manuzio, 15 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY - info@rimos.com

Formulazione  
Oleosa

# Hyperoil®

Dispositivo medico classe IIb  
Solo per uso cutaneo



## Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

## Tipologia dell'operatore

**Per lesioni semplici:** seguire le indicazioni riportate nel presente foglietto illustrativo.

**Per lesioni complesse (che richiedono supervisione medica):** il dispositivo può essere usato sia in strutture sanitarie sia a domicilio sotto controllo medico, a cura del personale sanitario o anche da parte di familiari o addetti all'assistenza, adeguatamente addestrati all'uso del prodotto.

## Modalità di applicazione

CONTAGOCCE 50 ml – FLACONE spray 100ml

**Trattamento di lesioni semplici:** *herpes labialis, acne infetta, eczemi, orticaria, micosi, escoriazioni, pruriti intimi, emorroidi, fistole, ragadi, occhio di pernice, onicomicosi, tiloma, verruche, unghie incarnite, piede d'atleta, ustioni, ferite traumatiche.*

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Hyperoil® e massaggiare fino a completo assorbimento. Coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante o con garza sterile in TNT, in modo che i fattori esterni non diano luogo ad infezioni. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento. In caso di micosi e onicomicosi: applicare Hyperoil® per almeno 15 giorni dopo la completa rigenerazione.

**Trattamento di lesioni complesse:** *ferite traumatiche e post-chirurgiche, ustioni, ulcere, ulcere da pressione (prevenzione), radiodermiti, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, gestione dei trapianti cutanei.*

**ATTENZIONE:** le lesioni complesse richiedono sempre la supervisione di un medico o di personale medico autorizzato.

## Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tessutale è minore di 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

## Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tessutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente



**RI.MOS.**  
Medical Products

**RI.MOS. sr.l** Via Manuzio, 15 - 41037 Mirandola (MO) - ITALY - info@rimos.com

**Formulazione  
Oleosa**

# Hyperoil®

Dispositivo medico classe IIb  
Solo per uso cutaneo



## Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 20°C e 35°C. A temperature inferiori a 17°C, il dispositivo nella formulazione oleosa tende a solidificarsi, ma appena applicato sulla pelle, fluidifica immediatamente, senza alterare i principi attivi.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- La formulazione oleosa deve essere agitata bene prima dell'uso.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

*NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI*

## INCI della formulazione oleosa



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower Extract.

**Rev. 16 di Settembre 2023**

**La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.**

CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE E DA FONTI DI CALORE	CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO	CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +20°C E +35°C	MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE
LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	e QUANTITÀ STIMATA	DOPO L'USO NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD.INT. ISTOIL-ITA



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente