

Fiala Olio

Hyperoil®

Dispositivo medico classe IIb
Solo per uso cutaneo

Destinazione d'uso

Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura che normalmente si risolvono per seconda intenzione.

L'effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tissutale cutanea in lesioni acute e croniche, riduce la formazione del cheloide, mantiene inalterata la crescita batterica. Inoltre l'effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tissutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara.

Modalità di applicazione

FIALA OLIO 5ml

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Hyperoil® anche più volte al giorno per i primi 2-3 gg, esercitando un leggero massaggio se necessario. Successivamente, diminuire le applicazioni giornaliere o applicare a giorni alterni, fino al totale risanamento della lesione.

Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tissutale è minore di 30 mmHg di O₂.

Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tissutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascolarizzazione della lesione.

Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tissutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 20°C e 35°C. A temperature inferiori a 17°C, il dispositivo nella formulazione oleosa tende a solidificarsi, ma appena applicato sulla pelle, fluidifica immediatamente, senza alterare i principi attivi.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- La formulazione oleosa deve essere agitata bene prima dell'uso.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI









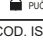



INCI della formulazione oleosa Fiala 5ml



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower Extract.

Rev. 16 di Giugno 2023

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

 CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE E DA FONTI DI CALORE	 CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO	 CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +20°C E +35°C	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE
 LOT NUMERO DI LOTTO	 REF CODICE PRODOTTO	 QUANTITÀ STIMATA	 DOPO L'USO NON DISPNDERE NELL'AMBIENTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD. ISTOILS-ITA



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente